

Oxivir Excel Foam CE

Širokospektrálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok na neinvazívne zdravotnícke pomôcky a tvrdé neporézne povrchy

Popis

Diversey Oxivir Excel Foam CE je jedнокrokový čistiaci a dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom účinnosti a krátkou kontaktnou dobou určený na okamžité použitie. Na základe patentovanej technológie Diversey AHP (akcelerovaný peroxid vodíku) môže byť prostriedok používaný na neinvazívne zdravotnícke pomôcky, na tvrdé neporézne povrchy a niektoré mäkké povrchy.

Kľúčové vlastnosti

- Baktericídny, virucídny a účinný proti kvasinkám
- Dezinfikuje do 5 minút
- Bezpečný k užívateľom i povrchom
- Efektívne čistí
- Bez parfumácie
- Rozloží sa na vodu a kyslík
- Nie je potrebné oplachovať

Výhody

- Široká účinnosť poskytuje najvyššiu úroveň ochrany pacienta. Dôkladne testovaný európskymi normami. Je efektívny proti niekoľkým patogénom, plne virucídny vrátane *Poliovirus*, *Adenovirus* a *Murine norovirus*. Efektívny tiež proti obaleným vírusom ako sú: HIV, HBV, HCV, *Influenza*, *Vaccinia virus* a *Coronavirus*.
- Počas krátkej kontaktnéj doby zostávajú povrchy mokré, vďaka tomu je zaručená dezinfekčná účinnosť.
- Skvelé čistiace vlastnosti vrátane odvápnenia a schopnosti zabraňovať opätovnému usadzovaniu eliminujú nutnosť predčistenia.
- Skvelé výsledky bezpečnosti pri používaní redukujú pracovné riziko. Bez nebezpečenstva pri použití. Nedráždi respiračné ústroje.
- AHP technológia je šetrná k povrchom, a tým predlžuje ich životnosť.
- Vhodný na použitie vo vysoko rizikových oblastiach v zdravotníctve, vrátane OR, ICU (Jednotka intenzívnej starostlivosti), NICU (Starostlivosť o novorodencov/neonatologie) a tiež v izbách pacientov.

Použitie

Aplikácia

Penové čistenie a dezinfekcia:

1. Odstráňte hrubé nečistoty.
2. Aplikujte na povrch buď nastriekaním na utierku a zotretím povrchu alebo naneste priamo na povrch postrekom zo spreja.
3. Po uplynutí kontaktnéj doby*, buď utrite do sucha alebo nechajte oschnúť na vzduchu.


Systém stierania suchými utierkami na jedno použitie:

1. Pripravte si Systém stierania suchými utierkami na jedno použitie podľa inštrukcií.
2. Odstráňte hrubé nečistoty.
3. Vyberte jednu utierku a utrite povrch.
4. Po uplynutí kontaktnéj doby*, buď utrite do sucha alebo nechajte oschnúť na vzduchu.
5. Vymeňte utierku, pokiaľ je viditeľne zašpinená alebo sa presuňte na inú čistenú oblasť.

Dôležité: Nemiešajte s inými prostriedkami. Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu alebo kyselinu.

* Zaisťte, že povrch zostane mokry počas celej kontaktnéj doby.

CE
0088

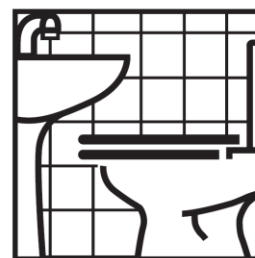

© A.I.S.E.

Oxivir Excel Foam CE

Širokospektrálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok na neivazívne zdravotnícke pomôcky a tvrdé neporézne povrchy

Technické údaje

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina
Relatívna hustota [20° C]: 1
pH: 1,95
Bod vzplanutia: N/A
Životnosť: 720 dní
Vôňa: neutrálna

Uvedené údaje sú typické pre bežnú výrobu, ale nie je možné ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na stránkach <https://sds.diversey.com>. Skladujte v originálnych obaloch mimo extrémne teploty. Reaguje s oxidovateľnými látkami.

Kompatibilita

Pri dodržaní doporučených podmienok je Diversey Oxivir Excel Foam vhodný na použitie na väčšinu materiálov.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Látky, ktoré obsahuje prostriedok sú biologicky odbúrateľné v súlade s požiadavkami EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Mikrobiologické dáta

Účinnosť	EN test (špinavé podmienky)	Kontaktná doba
Baktericídna	EN13727	30 sekúnd
	EN13697	5 minút
	EN16615	1 minúta
Proti kvasinkám	EN13624	5 minút
	EN13697	5 minút
	EN16615	1 minúta
Virucídna	EN14476	30 sekúnd